



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Pinza para papel higiénico TORHEL

ref: AD855

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cuidado-personal/pinza-para-papel-higienico-torkel>




Facilita la higiene personal a personas con problemas de agarre o movilidad. Las personas con reuma, por ejemplo, encuentran el Torkel fácil de agarrar y manipular. Lavable y fácil de limpiar.






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

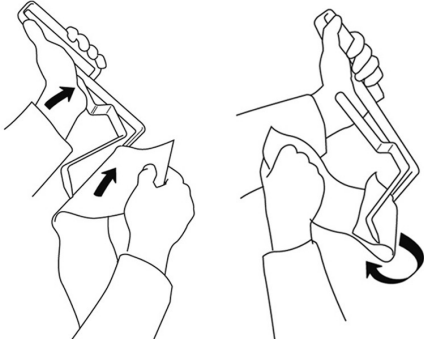


**Paso 1.** Corte un trozo de papel de WC (aprox.40 cm). Abra las lengüetas apretando el mango y enganche el papel entre ellas.

**Paso 2.** Enrolle el papel de WC hasta cubrir el extremo de las lengüetas.

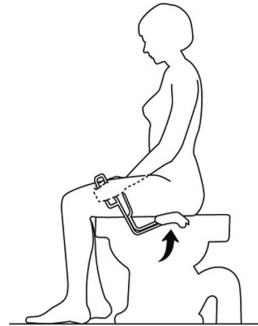

**Paso 3.** Ponga las lengüetas entre las piernas y frote.

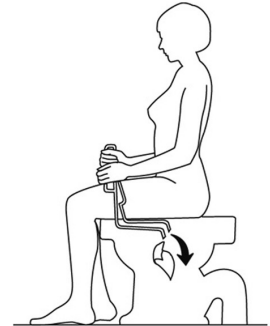

**Paso 4.** Abra las lengüetas apretando el mango y sacuda el papel para que caiga al WC. Limpie con detergente sin disolvente con un pH de 6 a 9, o con una solución desinfectante al 70%. Si es preciso se puede descontaminar a 85°C.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo
AD855	33 cm

