



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Orinal masculino portátil URIBAG

ref: H7250

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/incontinencia-y-orinales/orinal-masculino-portatil-uribag>



De idénticas características que el Urifem, pero adaptado a la fisiología masculina.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



- La tapa cierra con total seguridad impidiendo el goteo.
- Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo.

Instrucciones para Uribag M

- 1-Primero retire la tapa antes de deslizar la bolsa de látex del tubo.
- 2-Después de su uso, el Uribag M se puede enjuagar con agua (preferiblemente agua caliente), y de vez en cuando con agua y jabón.
- 3-Una vez vacía y limpia, la bolsa de látex se puede deslizar nuevamente dentro del tubo y volver a colocar la tapa.

Información Uribag M

Si no va a utilizar Uribag M durante un período de tiempo más largo, debe asegurarse de que el interior de la bolsa de látex esté seco.

Por razones de higiene, le recomendamos que conserve su Uribag M estrictamente para su uso personal.

Las personas con reacción de hipersensibilidad al látex no deben utilizar Uribag M.

El Uribag M debe exponerse lo menos posible a la luz ultravioleta (luz del día y del sol) y a sustancias oleosas.

No permita que el Uribag M entre en contacto con objetos punzantes, y no manipule el Uribag M con agentes químicos y/o sustancias grasas.

El Uribag M tiene un contenido máximo de 1200 cc aproximadamente.

La bolsa está fabricada en látex, un producto 100% natural. Por lo tanto, si se usa con frecuencia, el desgaste puede ocurrir antes.

1200

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H7250	1200 cc

