



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Orinal masculino portátil URIBAG

ref: H7250

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/incontinencia-y-orinales/orinal-masculino-portatil-uribag>



De idénticas características que el Urifem, pero adaptado a la fisiología masculina.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- La tapa cierra con total seguridad impidiendo el goteo.
- Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo.

**Instrucciones para Uribag M**

- 1-Primero retire la tapa antes de deslizar la bolsa de látex del tubo.
- 2-Después de su uso, el Uribag M se puede enjuagar con agua (preferiblemente agua caliente), y de vez en cuando con agua y jabón.
- 3-Una vez vacía y limpia, la bolsa de látex se puede deslizar nuevamente dentro del tubo y volver a colocar la tapa.

**Información Uribag M**

Si no va a utilizar Uribag M durante un período de tiempo más largo, debe asegurarse de que el interior de la bolsa de látex esté seco. Por razones de higiene, le recomendamos que conserve su Uribag M estrictamente para su uso personal. Las personas con reacción de hipersensibilidad al látex no deben utilizar Uribag M. El Uribag M debe exponerse lo menos posible a la luz ultravioleta (luz del día y del sol) y a sustancias oleosas. No permita que el Uribag M entre en contacto con objetos punzantes, y no manipule el Uribag M con agentes químicos y/o sustancias grasas. El Uribag M tiene un contenido máximo de 1200 cc aproximadamente. La bolsa está fabricada en látex, un producto 100% natural. Por lo tanto, si se usa con frecuencia, el desgaste puede ocurrir antes.

1200

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H7250	1200 cc

