



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Orinal femenino portátil URIFEM

ref: H7251

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/incontinencia-y-orinales/orinal-femenino-portatil-urifem>



Diseñado para adaptarse a la forma femenina, se puede utilizar tanto sentada como de pie.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia





- La tapa cierra con total seguridad impidiendo el goteo
- Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo

Instrucciones para Uribag F

- 1-Primero retire la tapa y solo luego deslice la bolsa de látex del tubo.
- 2-Después de su uso, el Uribag F se puede enjuagar con agua (preferiblemente agua caliente), y de vez en cuando con agua y jabón.
- 3-Una vez vaciado y enjuagado el Uribag F, vuelva a colocar el tapón girándolo 1/4 y empuje el aire hacia afuera de la bolsa.
- 4-Coloque la bolsa de látex en el tubo.
- 5-Gire la tapa hacia atrás 1/4 y cierre la tapa con un clic.

Información Uribag F

Si no va a utilizar Uribag F durante un período de tiempo más largo, debe asegurarse de que el interior de la bolsa de látex esté seco. Por razones de higiene, le recomendamos que conserve su Uribag F estrictamente para su uso personal.

Las personas con reacción de hipersensibilidad al látex no deben utilizar Uribag F.

El Uribag F debe exponerse lo menos posible a la luz ultravioleta (luz del día y del sol) y a sustancias oleosas.

No permita que el Uribag F entre en contacto con objetos punzantes y no manipule el Uribag F con agentes químicos y/o sustancias grasas.

El Uribag F tiene un contenido máximo de 1200 cc aproximadamente.

La bolsa está fabricada en látex, un producto 100% natural. Por lo tanto, si se usa con frecuencia, el desgaste puede ocurrir antes.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Capacidad |
|--------|-----------|
| H7251 | 1.200 cc |

