



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cama Dali BLUETOOTH

ref: AD969

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/camas-electronicas/dali-bluetooth>



Ahora con mando inalámbrico sin cables (bluetooth). Elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



La cama Dali dispone de varias funciones para ajustar la posición del colchón. Pero a veces no es recomendable alguna posición debido a la patología del usuario. Por ejemplo: si el cuidador quiere bloquear la función de Trendelenburg o para bajar el respaldo, nuestra aplicación Dali-Lock puede ayudar. Esta aplicación funciona con Android o Apple. Se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones habituales totalmente gratuita.

### **La aplicación Dali-Lock**

1. Descargue la aplicación Dali-Lock gratuita en su smartphone Android o Apple
2. Inicie la búsqueda de cama. La aplicación encontrará la cama Dali.
3. Sincronice su smartphone con la cama escaneando el código en la parte posterior del mando.
4. Ahora puede bloquear o desbloquear cada una de las posiciones de la cama.

### **24 VOLTIOS EN LA CAMA**

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama.

Ahorro económico: hasta € 15 por cama/año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar solo cada 10 años. No hay corriente eléctrica en la cama cuando el mando no actúa, y cuando se acciona el mando solo llegan 24 voltios a la cama.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la más parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón del mando.



### BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK

Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.



### FRENOS

Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o con calcetines.



### TRAPECIO INCORPORADOR DE SERIE


#### Incorporarse y levantarse sin ayuda

Trapezio diseñado para ayudar a las personas a sentarse y levantarse de la cama.

El asidero triangular se ajusta a la medida más conveniente.



### MEDIDAS:

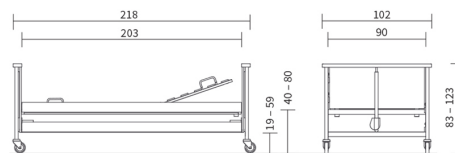



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

185

