



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Buggy basculante y reclinable BUG

ref: BUG

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-basculante-y-reclinable-bug>



La silla basculante que crece con el niño. Con 2 tallas incluye 4 medidas (2 por talla) y un amplio rango de regulación. La silla BUG es segura, ligera, manejable, compacta y fácil de personalizar. Está pensada para la mamá y el niño.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



SISTEMA MODULAR:

El asiento de la silla Bug tiene la posibilidad de ser usado en cuatro bases distintas (una para uso en exteriores y tres para uso en interiores).





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El único buggy con el sistema de basculación incorporado a la silla y no en el carro, de tal manera que la postura de la silla no debe volverse a acomodar después de extraerla del carro.

Mediante dos pistones de gas es posible regular la reclinación y basculación de la silla de una manera continua, sin dentados ni cremalleras, con una sola mano.

SISTEMA DE PLEGADO:

Fácil de plegar en cuestión de segundos. El asiento no pierde las regulaciones que se han configurado inicialmente.



Ayudas Dinámicas®


Productos para una mayor independencia



Asiento desenganchado



Cochecito cerrado con asiento introducido

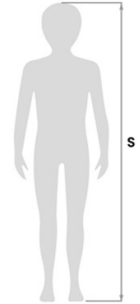

MEDIDAS Y TALLAS:

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (grados)	J (grados)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	Capacidad máx.	Peso chasis	Peso asiento	Peso total
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

Los números separados con un guión indican una regulación mínima y una regulación máxima





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ACCESORIOS OPCIONALES:



863 Apoyacabezas con protecciones occipitales-parietales, regulable en altura, anchura, inclinación y en anterior-posterior.



852 Apoyacabezas con protecciones laterales, regulable en altura y anchura.



942 Apoyacabezas ergonómico Regulable en altura, inclinación y entero-posterior con patas regulables. También disponible en talla L, para casos particulares.



868 Soportes de tronco con unión (envolventes), regulables en altura y anchura.



834 Taco abductor acolchado regulable en profundidad.



834R Taco abductor acolchado regulable en profundidad y abducción.



835 Apoyacabezas moldeado



934 Enganche para apoyacabezas en suspensión. Disponible solo para apoyacabezas 863.



838 Soportes torácicos regulables en altura y anchura.



853 Chaleco



903 Chaleco de seguridad 5 puntos



906 Tirante de seguridad 5 puntos



894 Cinturón pélvico de 45°



820 Cinturón de cuatro puntos



827 Correas para pies



905 Freno manual para base 869.



935 Soporte para botella de oxígeno 863 Dimensiones máximas de la botella de oxígeno: altura 600 mm (incluida inclusión) y diámetro 140 mm. El chasis se plega sin quitar el accesorio.



911 Bandeja porta respirador para base 863. El chasis se plega sin quitar el accesorio.



839 Barra de apoyo frontal Regulable en inclinación.



824 Mesa transparente Envolverte con escotadura. Regulable en inclinación.



824B Mesa para base de interior Fabricado con material resistente e higiénico, diseño sin bordes que no atrapa residuos de comida.



819 Capota combinada con la tapicería. Resistente y fácilmente regulable.



825 Funda para lluvia (para fijar en la capota 819) para base 869.



818 Funda térmica



892 Tapizado para reposapiés acolchado y removible.



854 Sombrella para base 869, combinada con la tapicería.



858 Cesta para base 869



921 Plataforma para transporte de segundo pasajero Posicionada detrás del cochecito. Para base 869. Para niños de al menos 15 meses de edad. Capacidad máxima 20 kg.



922 Porta botellas para base 869.



891 Anclajes (4 anillos) Para el transporte en dirección del sentido de la marcha en vehículos en movimiento (coches privados, autobuses, homologados...). Solo para base 869. Véase manual de uso y mantenimiento suministrado con el oxígeno.

