



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Andador TREKKER

ref: TK..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-ninos/andador-trekker>



El andador Trekker ofrece una gran variedad de niveles de apoyo para los niños que requieren asistencia para caminar. Puede usarse como andador anterior o posterior.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Facilita y ayuda al traslado autónomo del niño.
- Entrenamiento para iniciar deambulación autónoma.
- Disponibles en tres tallas.
- Altura ajustable en incrementos de 2,5 cm.
- Se puede usar en postura anterior y posterior proporcionando mayor flexibilidad al niño.
- Mecanismo de bloqueo direccional en las cuatro ruedas para facilitar el paso de ruedas giratorias a fijas.
- Resistencia variable para controlar la velocidad de giro de las ruedas.
- Freno para bloquear las ruedas y proporcionar estabilidad.
- Palanca anti-retroceso que permite la movilidad tanto hacia delante como hacia atrás. O únicamente hacia delante.
- Trekker Junior y Juvenil se pliegan fácilmente para facilitar su transporte y almacenaje.
- Accesorios de montaje sin herramientas, se pueden añadir o quitar según las habilidades y necesidades del usuario.



Disponible en tres tallas con una amplia gama de accesorios opcionales.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES:**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Asas para las manos Ref.: TK 1010**



**Maneta de empuje Ref.: TK 1020**



**Empuñaduras Ref.: TK 1045**



**Sujeción de tobillos**


Ref.: Para modelo  
TK 1060S ... TK 1000  
TK 1060M ... TK 2000  
TK 1060L .... TK 3000



**Posicionador de cadera**  
Ref.: TK 1070S - TK 1070L



	Pequeño	Grande
A	28 cm	41 cm
B1	22 cm	27 cm
B2	25 cm	32 cm
C	19 cm	30 cm
D	7 cm	10 cm

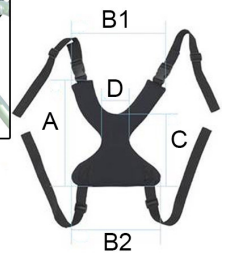

**Asiento arnés**

Ref.: KS300-L / KS300-SM





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Soportes de antebrazo**  
Ref.: TK 1035S - TK 1035L



**Sujeción de pierna**  
Ref.: TK 1090S - TK1090L



**Soporte de tronco**  
Ref.: TK 1080S, TK 1080M, TK 1080L





### **Empuñaduras**

Pueden ser montadas en cualquier lugar del manillar y son regulables en altura y giro.

### **Soportes de antebrazo**

- Ajustable en altura y profundidad. Los soportes pueden girar, pronar o supinar. Las empuñaduras se pueden mover hacia adelante o hacia atrás, supinación, pronación y se pueden ajustar en ángulo.
- Pueden montarse hacia el interior o el exterior del manillar.

### **Sujeción de tobillos**

Usado por pacientes con espasticidad, control deficiente, ataxia y aducción excesiva. Longitud ajustable, correas de tobillo acolchadas, para mantener piernas y/o pies en abducción y prevenir marcha en tijera.

### **Posicionador acolchado de cadera**

Altura de arnés de asiento ajustable, coloca cadera y pelvis, y permite al usuario cambiar el peso de una pierna a la otra. Se pueden acortar las correas para ayudar en la carga de peso o alargar las correas para usarlas como cable de seguridad. La posición de las correas en el manillar afectará a la posición de la pelvis del niño. Almohadilla extraíble que proporciona comodidad.

### **Soporte de tronco**

- Asegura el tórax en el ángulo deseado.
- Acolchado, ajustable en altura, profundidad, anchura y ángulo.
- En su posición más baja, puede usarse como posicionador pélvico.
- Los ajustes se pueden hacer mientras el usuario está en el andador.

### **Sujeción de pierna**

- Ajustable en altura. Puede colocarse más cerca o más lejos del usuario para limitar la aducción/abducción.
- Movimientos con el patrón de marcha de usuario que permite el cambio de peso de una pierna a otra.
- Evita que se crucen las piernas.

## **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>TALLAS</b>	<b>Altura ajustable</b>	<b>Ancho total</b>	<b>Ancho entre puños</b>	<b>Largo total</b>	<b>Carga máx.</b>
---------------	---------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

TK 1000	Infantil	38 - 47 cm	56,5 cm	32 cm	81 cm	34 kg
TK 2000	Junior	56 - 66 cm	62 cm	43 cm	79 cm	68 kg
TK 3000	Juvenil	74 - 99 cm	67 cm	46 cm	94 cm	90 kg

