



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevadores de WC 'Ashby y Derby'

ref: AD507/AD508

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevadores-de-wc-ashby-y-derby>




Elevadores universales de WC. Se adaptan a casi todas las tazas de inodoro. De construcción plástica de una sola pieza para una higiene total. Se montan fácilmente sin herramientas.

Escoger el asiento adecuado





En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.

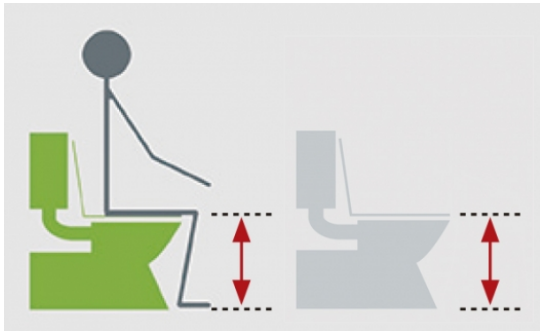

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Alto | Tapa | Ancho orificio | Fondo orificio |
|--------|-------|------|----------------|----------------|
| AD508C | 5 cm | No | 20 cm | 25 cm |
| AD507 | 10 cm | No | 20 cm | 25 cm |
| AD508A | 15 cm | No | 20 cm | 25 cm |





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

| | | | | |
|------------|-------|----|-------|-------|
| AD507-LUX | 10 cm | Sí | 20 cm | 25 cm |
| AD508A-LUX | 15 cm | Sí | 20 cm | 25 cm |

