



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



SILLA DE RUEDAS
AUTOPROPULSABLE
RUEDAS 24" **APOLO-4**

SILLA DE RUEDAS DE
TRÁNSITO RUEDAS 12"
APOLO-4



Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, léalo detenidamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla de ruedas manual y plegable. Reposabrazos abatibles y reposapiés desmontables y regulables en altura. Fabricada en acero. Ruedas traseras con sistema de extracción rápida (en versión ruedas de 600mm., autopropulsable). También disponible versión no autopropulsable con ruedas de 305mm.

USO PREVISTO

La silla de ruedas APOLO 4 ha sido diseñada para uso tanto interior como exterior. Puede ser autopropulsada por el paciente o puede ser empujada por otra persona o acompañante.

La APOLO 4 está diseñada para una carga máxima de 120 kg. Esta especificación puede ser confirmada en la etiqueta identificativa del número de serie ubicada en el cuadro/estructura de la silla de ruedas.

Indicaciones de uso

Incapacidad para caminar o severa discapacidad debido a:

Parálisis, pérdida de miembros inferiores, deformidad de miembros inferiores, contractura/daño en articulación (no en ambos brazos) y otras patologías.

Contraindicaciones

El uso de la silla de ruedas es inadecuado en caso de:

Severo desequilibrio, pérdida de ambos miembros superiores, contracturas/daños en articulación de ambos brazos, incapacidad de sentarse o vista inadecuada o dañada.

ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

Lea el manual del usuario

Nombre/Dirección del fabricante

Nombre del producto

Referencia

Número de Serie

Peso máximo usuario

Fecha de fabricación

Producto Sanitario

Conformidad Europea

AYUDAS TECNO DINÁMICAS S.L.
C/ Llobregat nº 12, Santa Perpètua,
08130, Barcelona.

SILLA DE RUEDAS MANUAL APOLO 3

REF XXXXXX

SN XXXXXXXXXX

120 Kg.

xx/xxxx

MD CE

MODELO AUTOPROPULSABLE, RUEDAS TRASERAS DE 600 MM.



MODELO NO AUTOPROPULSABLE, RUEDAS TRASERAS DE 305 MM.

Versión de traslado

La versión de traslado está diseñada para que la guíe exclusivamente el asistente. Para facilitar los traslados laterales y ocupar menos espacio, la silla de ruedas está equipada con ruedas traseras de 305 mm (12").



DIMENSIONES Y PESOS

AP4-	40	42	44	46	49	52
Ancho asiento	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profundidad asiento	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Ancho total	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	69 cm
Largo total	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm
Altura del asiento	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altura del respaldo	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altura de los reposabrazos	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Rueda trasera	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Peso total	16,8 Kg	17,0 Kg	17,3 Kg	17,5 Kg	17,8 Kg	18,1 Kg
Peso máximo	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
AP4-	40T	42T	44T	46T	49T	52T
Ancho asiento	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profundidad asiento	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Ancho total	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	67 cm
Largo total	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Altura del asiento	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altura del respaldo	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altura de los reposabrazos	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Rueda trasera	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Peso total	14,8 Kg	15,0 Kg	15,3 Kg	15,5 Kg	15,8 Kg	16,1 Kg
Peso máximo	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

USANDO LA SILLA DE RUEDAS

SENTARSE Y LEVANTARSE DE LA SILLA

Las distintas incapacidades permiten más o menos maniobrabilidad.

Para evitar que la silla de ruedas se mueva mientras se sienta, puede ser de ayuda colocar ambas ruedas traseras contra la pared.


SENTARSE EN LA SILLA DE RUEDAS

1. Saque los reposapiés.
2. Si es posible, coloque las ruedas traseras contra una pared para evitar cualquier movimiento de la silla y coloque ambos frenos.
4. Sitúese delante de la silla. Luego cuidadosamente vaya hacia atrás hasta que las piernas toquen el asiento.
5. Coja los reposabrazos con las manos y siéntese despacio y con cuidado.
7. Vuelva a poner los reposapiés en su sitio y despliegue las plataformas.

LEVANTARSE DE LA SILLA DE RUEDAS

Lleve a cabo el mismo procedimiento de manera opuesta.

NOTA: Para transferir de lado, debe abatir el reposabrazos del lado que va a realizar la transferencia.

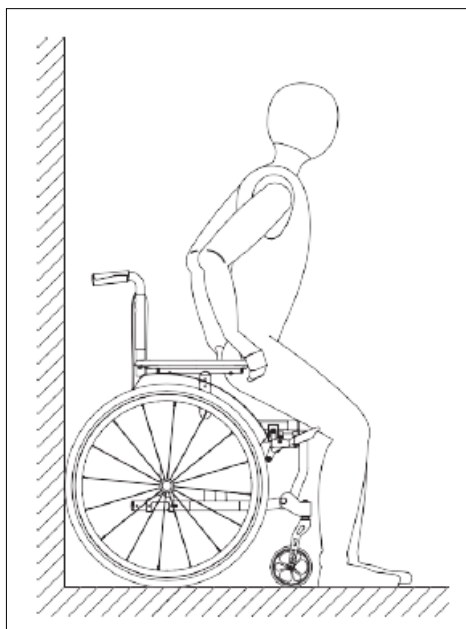

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Para evitar caídas y situaciones peligrosas, primero debe practicar el uso de su nueva silla de ruedas en un terreno nivelado y claramente plano. Se recomienda un acompañante.

Por favor, lea todas las advertencias de seguridad:

- Nunca deje a los niños o adolescentes en silla de ruedas sin supervisión.
- Antes de usar la silla de ruedas, compruebe si todas las piezas instaladas están correctamente aseguradas.
- Antes de usar la silla de ruedas por primera vez, practique movimientos en un terreno nivelado y claramente dispuesto.

Familiarizarse intensamente usted mismo con su comportamiento de frenado y aceleración cuando se mueve hacia adelante y en las curvas.

- Siempre bloquee el freno antes de sentarse o levantarse de la silla de ruedas.
- La silla de ruedas no puede utilizarse para transportar varios individuos o cargas. Está destinado a transportar solo a una persona, sentada en el asiento.
- Nunca use la silla de ruedas bajo la influencia del alcohol u otras sustancias que influyen en la atención o la receptividad física y mental.

-Tenga en cuenta que el riesgo de vuelco puede aumentar debido a cambios en el equilibrio como resultado del movimiento del cuerpo o la carga de la silla de ruedas.

-Existe un riesgo de vuelco hacia atrás en pendientes de 10 ° o más.

-Los soportes antivuelco deben fijarse en la posición correcta para aumentar la protección contra vuelcos hacia atrás.

-El uso de rampas es esencial para salvar cualquier obstáculo.

-Si no se pueden pasar surcos, rieles u obstáculos similares se deben cruzar en ángulos rectos (90°).

-No empuje su silla de ruedas hacia delante contra bordillos, bordes u otros obstáculos.

-No salte obstáculos (bordillos, bordes, escalones, etc.) sentado en la silla de ruedas.

-No se apoye en las plataformas de los pies mientras se levanta o se sienta.

PREPARANDO LA SILLA DE RUEDAS PARA SU USO

A continuación encontrará notas sobre como desplegar la silla de ruedas y prepararla para su uso. Para empezar, simplemente tiene que desempaquetar la silla, coloque los reposapiés.

PLEGADO/DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para desplegar la silla, inclínela levemente hacia un lado. En el lado que está en el suelo, presione el tubo del asiento hacia abajo hasta que encaje en su sitio (2). Puede ser necesario presionar hacia abajo los dos tubos del asiento con las manos para acabar de abrirla por completo.



PLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para plegar la silla, plegue las plataformas del reposapiés o extraiga los reposapiés completos. Tire del tapizado del asiento hacia arriba, cogiéndolo por la parte delantera y trasera (1).

MONTAJE DE LOS REPOSAPIÉS

-Coloque los agujeros del reposapiés alineados con los pivotes de la parte delantera del chasis y encájelos tal como muestra la figura 1.

-Abata el reposapiés hacia dentro de la silla hasta que encaje el gatillo de cierre (ver figura 2).

! Asegúrese que el reposapiés está bien anclado, puede tirar hacia los lados para realizar esta comprobación.

-Abata la plataforma del reposapiés hasta que quede paralela al suelo, tal como muestra la figura 3.

-Repita la misma operación con el otro reposapiés.

FIGURA 1

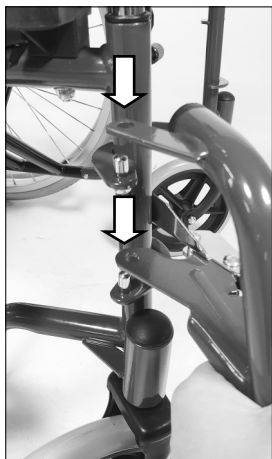


FIGURA 2


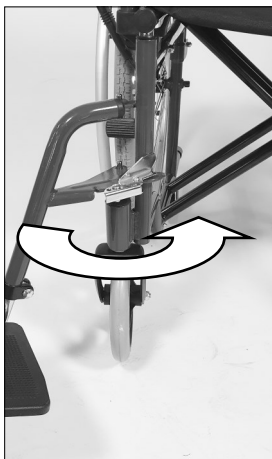



FIGURA 3

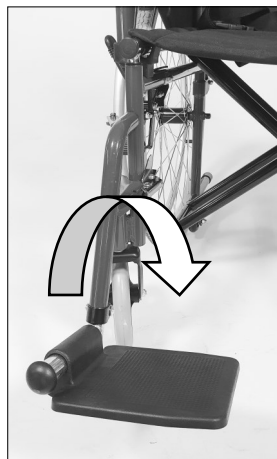

REGULACIÓN DE ALTURA DEL REPOSAPIÉS

Para regular la altura del reposapiés afloje primero la tuerca hasta que pueda mover el tubo cromado. Régúlelo a la altura deseada y vuelva a apretar la tuerca firmemente.


! Asegúrese que está bien apretado tirando del tubo cromado.

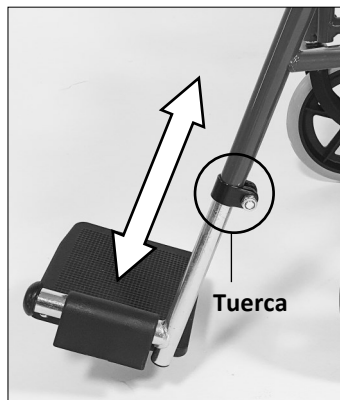

ABATIR LOS REPOSABRAZOS

Los reposabrazos pueden abatirse hacia atrás para hacer la transferencia a la silla de manera más fácil.


Para abatir el reposabrazos, presione la palanca de bloqueo (1) hacia delante al mismo tiempo que levanta el reposabrazos (2). Para bajar el reposabrazos, abátalo hacia su anclaje (3) y encájelo en él. Asegúrese que queda bien fijado tirando hacia arriba.

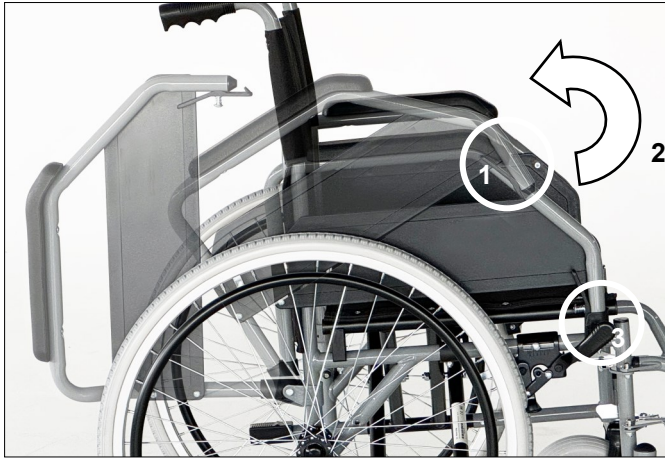

REGULACIÓN DE LOS FRENOS DE BLOQUEO

La distancia entre la zapata del freno y la cubierta de la rueda trasera debe ser de 3-5 mm en el punto más estrecho cuando el mecanismo del freno está completamente abierto (1).

Para ajustar / corregir la distancia, afloje el tornillo (2). Luego regule los frenos a la posición correcta. Ahora vuelva a apretar el tornillo y verifique la función de los frenos. Cuando los frenos están accionados, la silla de ruedas no debe moverse.

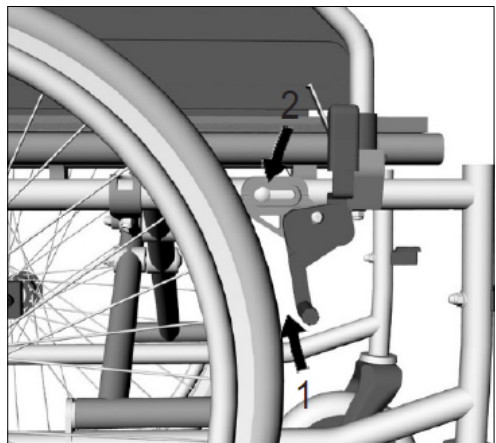



USO DE LOS FRENOS DE BLOQUEO

La silla de ruedas tiene un freno de bloqueo en cada lado. Los frenos permiten al usuario estacionar de manera segura la silla de ruedas.

Solo se deben accionar los frenos cuando la silla está totalmente parada.

Para hacerlo, empuje la palanca hacia adelante (1) hasta que queden sujetos y no retrocedan. Notará que la palanca encaja en su lugar al apretar los frenos (2). La silla de ruedas ahora es estable; Usted se puede trasladarse a otra silla o estacionarla.

Para desbloquear los frenos, simplemente tire de la palanca hacia atrás.

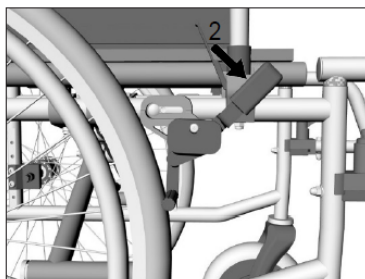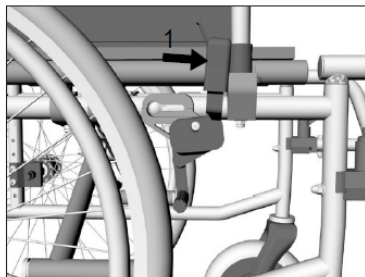


USO DE LOS AROS DE EMPUJE PARA PROPULSARSE Y FRENAR LA SILLA DE RUEDAS. Solo para modelo autopropulsable con ruedas traseras de 600mm.


La silla de ruedas es propulsada y frenada usando los aros.

Durante el primer uso, practique cuidadosamente en terreno a nivel con la ayuda de un acompañante hasta que se acostumbre a su nueva silla. No debería usarla por calles publicas hasta que no tenga suficiente experiencia. Tenga especial cuidado cuando enfrente algún obstáculo.

La silla de ruedas se puede maniobrar hacia delante, hacia atrás y de izquierda a derecha utilizando los aros de empuje de las ruedas traseras. Sostenga el aro con la mano y mueva la rueda hacia adelante o hacia atrás.

Coloque su mano en el aro con el pulgar en la dirección del movimiento y forme un puño con sus dedos en el borde del aro.

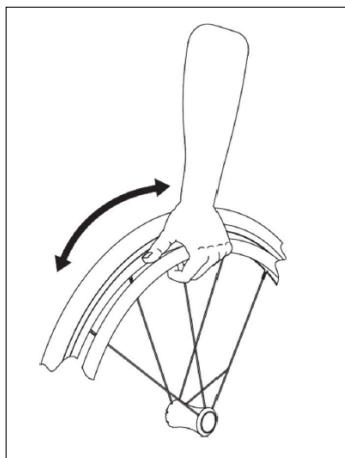


 Al impulsar su silla de ruedas, asegúrese de no tocar la cubierta del neumático con el pulgar.

Para frenar la silla, deje que los aros de empuje se deslicen a través de su mano ejerciendo una presión de una manera controlada.

Para dirigir la silla de ruedas, disminuya la velocidad sobre el aro del lado al que debe moverse o girar la silla de ruedas.


Para girar sobre si mismo, empuje una mano hacia adelante y la otra hacia atrás al mismo tiempo.

 Durante las maniobras de frenado fuerte, los aros pueden calentarse bastante.

EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS (QUICK-RELEASE). Solo para modelo autopropulsable con ruedas traseras de 600mm.

Para el transporte de la silla o para usar las ruedas auxiliares que incorpora este modelo, es necesario retirar las ruedas traseras. Presione el botón del eje de liberación rápida (quick-release) con el pulgar situado en el centro del carrete de la rueda (1) y sostenga los radios con cuatro dedos. Ahora tire de la rueda trasera junto con el eje de liberación rápida hacia afuera del soporte del eje (2).

Para colocar las ruedas traseras, presione el botón del eje de liberación rápida con el pulgar. Ahora ponga el eje en el soporte. El eje encajará automáticamente en su lugar.

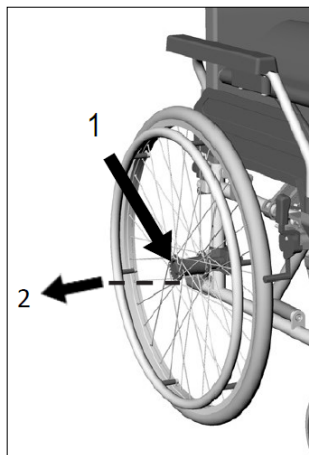

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmantele el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Las partes del chasis de la silla de ruedas se pueden limpiar con un paño húmedo. Se puede usar un agente de limpieza suave en el caso de suciedad más severa. Las ruedas se pueden limpiar con un cepillo húmedo con cerdas de plástico (¡no utilice un cepillo de alambre!). El material de tapicería se puede lavar con detergente suave hasta 40°C.

MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Que los neumáticos no estén dañados. Verifique regularmente la profundidad de la banda de rodadura del neumático una vez al mes.

Esta debe ser de al menos de 1mm. Los neumáticos defectuosos o desgastados deben ser reemplazados.

-La capacidad funcional del sistema de frenos. Debería ser imposible empujar la silla de ruedas cuando se acciona el freno. Si observa un comportamiento de frenado inusual, notifique inmediatamente a su distribuidor especializado y deje de usar la silla de ruedas.

-Que la tapicería del asiento y respaldo esté íntegra y limpia. Si está sucio, se puede limpiar de acuerdo con las instrucciones de limpieza. Si está dañado, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

-Que todas las partes móviles funcionen sin problemas y sin ruido. Los ruidos indican daños y deben ser revisados por un vendedor especializado.

-Que todos los tornillos estén apretados y las partes remachadas no estén dañadas.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

Inspección. Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

