



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



**SILLA DE RUEDAS ELÉCTICA PLEGABLE DE
CARBONO R800 Carbon**

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, léalo detenidamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla de ruedas eléctrica plegable con batería de Litio R800 para usuarios con incapacidad para caminar. Super ligera, fabricada en fibra de carbono, con un peso de 14 kg.

USO PREVISTO

La silla de ruedas eléctrica R800 ha sido diseñada como vehículo eléctrico para personas con incapacidad para caminar, pero cuyas capacidades visuales, físicas y mentales no están afectadas para manejar un vehículo eléctrico. La silla de ruedas se puede utilizar para uso interior como exterior.

La silla está diseñada para una carga máxima de 100 kg. Esta especificación puede ser confirmada en la etiqueta identificativa ubicada en el chasis de la silla de ruedas.

Indicaciones de uso

El uso de esta silla de ruedas eléctrica está recomendado para las siguientes indicaciones: La imposibilidad o posibilidad muy limitada de caminar dentro del propio domicilio. La necesidad de salir del domicilio para dar un paseo corto y tomar el aire o para llegar a lugares de actividad comercial cercanos al domicilio. El uso de sillas de ruedas eléctricas está recomendado para zonas de interior y exterior cuando la persona con discapacidad no puede utilizar una silla de ruedas manual, pero sí es capaz de manejar una silla electrónica.

Contraindicaciones

Personas cuyas capacidades visuales, físicas y mentales no están afectadas para manejar un vehículo eléctrico.



Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su capacidad para la conducción adecuada de la silla eléctrica. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario.

VIDA ÚTIL

Estimamos que la vida útil de este producto es de cinco años, siempre que se utilice de forma adecuada y se cumplan todas las normas de mantenimiento y de servicio recomendadas. Esta vida útil puede incluso prolongarse, si el producto se utiliza, mantiene y cuida con esmero y no haya limitaciones técnicas de acuerdo a posteriores avances técnicos y científicos. Esta vida útil puede asimismo reducirse considerablemente, si se somete a usos extremos e incorrectos. La estimación de una vida útil por parte de nuestra empresa no supone ninguna garantía adicional.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	R800 CARBON	Velocidad máxima	6 Km/h
Dimensiones	93*56*87 cm	Autonomía	20 Km
Chasis	Plegable fibra carbono	Pendiente máxima	6°
Motores	180W x 2 Brushless	Ruedas delanteras	165 mm.
Batería	24V Litio de 12Ah	Ruedas traseras	280 mm.
Cargador	HP 24V - 2A	Peso	14 Kg

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Consejos para la conducción

Precauciones generales para la conducción

- Mantenga las manos en el reposabrazos para controlar la silla de ruedas.
- Practique en parques u otros lugares abiertos y seguros para aprender a controlar la silla eléctrica.
- Siga estrictamente las normas de circulación peatonal, no utilice la silla de ruedas como vehículo.
- Conduzca por la acera y el cruce de peatones. No conduzca en carriles reservados para vehículos de motor.
- Conduzca adecuadamente y evite los cambios bruscos de dirección.

Obtenga ayuda de un asistente o evite conducir en estas condiciones

- Uso con mal tiempo, como días lluviosos, niebla intensa, viento fuerte, nieve, etc.
- Si la silla de ruedas está mojada, séquela inmediatamente.
- Conducción en mal estado de la calzada, con barro, por camino, arena, grava, etc.
- Conducir en carreteras llenas de gente.
- Para el cruce de ferrocarril, cuando tenga que cruzar la vía del tren, deténgase en el pasaje y asegúrese de que las ruedas no estén bloqueadas por los rieles.
- La silla de ruedas eléctrica es solo para uso personal, no transporte personas, mercancías ni remolque de carros u otros materiales.

Precauciones para subir y bajar cuestas

- Evite conducir en los siguientes lugares: caminos empinados, lugares inclinados, escalones altos, canales, etc.
- Evite circular por pendientes pronunciadas, las pendientes máximas que se pueden superar deben ser inferiores a 6°.
- Utilice el comando de control con cuidado cuando conduzca en pendientes.
- Conduzca con firmeza cuando vaya cuesta arriba o cuesta abajo.
- Reduzca la velocidad cuando vaya cuesta abajo.
- Evite conducir de costado en una pendiente.
- No lo use en escaleras y evite subir escalones altos.
- Evite cruzar zanjas grandes



No ponga la silla de ruedas en modo manual durante el ascenso y el descenso.

Si la silla de ruedas no funciona correctamente al cruzar una calle, pida ayuda de inmediato a un transeúnte y configure la silla de ruedas en modo manual, luego empújela y muévase inmediatamente del sitio a un lugar seguro.

Precauciones del cuidador

El ayudante debe comprobar que los pies del usuario estén en la posición correcta sobre el reposapiés y asegúrese de que su ropa no quede atrapada en las ruedas.

El cuidador debe empujar la silla de ruedas cuando está en modo manual para moverse.

OTRA INFORMACIÓN

Reparación y revisión

Si se requiere reparación o revisión, comuníquese con su distribuidor. No intervenga usted mismo, esto podría causar accidentes o mal funcionamiento.

Proteja el medio ambiente

Para proteger el medio ambiente, no abandone la silla de ruedas ni la batería. Comuníquese con su distribuidor local para reemplazar la batería por una nueva.

Mantenga seco el entorno de almacenamiento

No guarde la silla de ruedas en condiciones húmedas. Si la silla se moja con la lluvia, séquela inmediatamente.



No reemplace con repuestos no originales.

No agregue peso, corre el riesgo de inestabilidad de la silla de ruedas. No utilice otros vehículos para tirar o empujar la silla de ruedas cuando haya alguien sentado en ella o la silla de ruedas esté en modo manual.

En caso de anomalías, contactar inmediatamente con el servicio postventa.


Protección contra interferencias electromagnéticas

La silla de ruedas debe mantenerse alejada de campos magnéticos fuertes y equipos eléctricos inductivos grandes, como estaciones de radio, estaciones de televisión, estaciones de radio subterráneas, estaciones de transmisión de radio. Preste atención a esto si hay fuentes de interferencia electromagnética cerca y manténgase alejado de dichas fuentes para evitar la interferencia electromagnética.

PREPARANDO LA SILLA DE RUEDAS PARA SU USO

1- Retire la silla de ruedas eléctrica y los repuestos de su embalaje.

Instale el controlador (joystick) en el reposabrazos derecho o izquierdo del conductor.

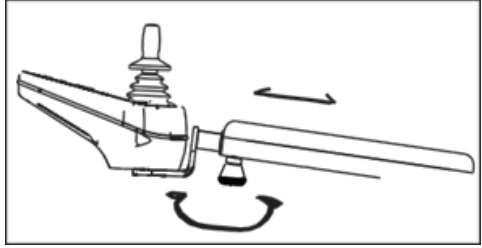

2- DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para desplegar la silla, inclínela levemente hacia un lado. En el lado que está en el suelo, presione el tubo del asiento hacia abajo hasta que encaje en su sitio (2). Puede ser necesario presionar hacia abajo los dos tubos del asiento con las manos para acabar de abrirla por completo.



PLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para plegar la silla, plegue las plataformas del reposapiés o extraiga los reposapiés completos. Tire del tapizado del asiento hacia arriba, cogiéndolo por la parte delantera y trasera (1).

3- FIJAR EL RESPALDO ABATIBLE.

La silla de ruedas eléctrica viene con respaldo abatible, para que ocupe menos espacios. Para fijar el respaldo tire de los puños hacia arriba hasta que anclen con el respaldo. Debe oír un “click” que indica que se han anclado en el chasis de la silla.

NOTA: Asegúrese que el respaldo está bien sujeto, tirando del respaldo hacia atrás.



3- MONTAJE Y REGULACIÓN DE ALTURA DE LOS REPOSAPIÉS

Para montar los reposapiés, antes retire los pasadores de seguridad de la parte delantera del chasis de la silla. Inserte el tubo del reposapiés en el alojamiento del chasis. En este momento, puede elegir la altura que desee. Vuelva a colocar el pasador para fijar el reposapiés.



5- PALANCAS DE EMBRAGUE DE LOS MOTORES

Para que los motores estén en posición eléctrica, debe colocar las dos palancas de los motores en la posición hacia arriba, tal como muestra la imagen. Si las palancas están en posición hacia abajo la silla está en posición manual, lo que permite al acompañante empujarla.



6- CONECTAR LA BATERÍA

Antes de su uso, debe conectar el cable del controlador a la batería de la silla, tal como muestra la imagen.



7- PUESTA EN MARCHA

Para poner en marcha la silla de ruedas, simplemente presione el botón de encendido del Joystick. Las luces del mando se encenderán.

Para parar la silla vuelva a presionar el botón de encendido. Todas las luces del mando se apagarán.



INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Instalación de la batería

La batería se encuentra situada en el lateral derecho de la silla. Antes de extraerla debe asegurarse que la silla está totalmente parada.

Para retirar la batería, simplemente pulse el botón y tire de ella hacia arriba.

Para colocarla, debe encararla en la guía y empuje hasta que oiga un click. Asegúrese que está bien colocada, puede tirar de ella para comprobarlo.



Reposabrazos abatible

Para abatir el reposabrazos debe presionar el botón de cierre tal como muestra la figura y tirar hacia arriba con la otra mano para abatirlo.





Para volver a colocarlo en la posición de uso, simplemente abata hacia abajo el reposabrazos hasta oír el “clic” del botón de cierre. Asegúrese que está sujeto tirando hacia arriba el reposabrazos.

Cambiar entre modo manual y modo eléctrico

Modo manual: apague y detenga la silla de ruedas, presione las 2 palancas ubicadas en los motores hacia abajo (hacia el candado abierto) para liberar la tracción de las ruedas.

Modo eléctrico: tire de las 2 palancas hacia arriba (hacia el candado cerrado) para volver a activar la tracción en las ruedas.

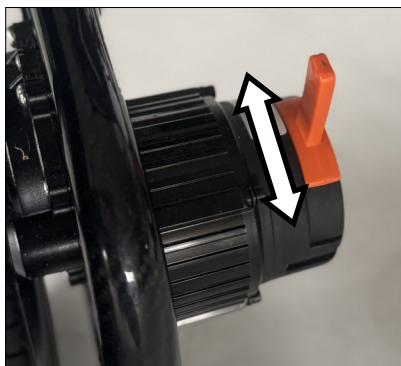

 Al cambiar del modo manual al modo de accionamiento eléctrico, compruebe que las palancas de enganche y desenganche de la tracción estén en la posición correcta.

No desactive el modo de conducción eléctrica de la silla de ruedas cuando el usuario esté conduciendo por pendientes.

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

Batería

Las baterías ya están colocadas, no es necesario quitarlas para plegar la silla de ruedas.

Requisitos y uso del cargador

El cargador se utiliza para cargar la batería. No utilice la silla de ruedas eléctrica mientras la recarga.

Voltaje de entrada: AC 220V±10% Voltaje de salida: 24V/DC Corriente de salida: 2A

Uso del cargador de batería

Para cargar la batería, conecte el cargador a la toma y al enchufe que se encuentra debajo del control. Siga las instrucciones para completar el proceso de carga:

- Asegúrese de que la silla eléctrica esté apagada.
- Conecte el enchufe principal del cargador a la fuente de alimentación y la luz roja se enciende. La carga completa tarda de 8 a 10 horas, no sobrecargue más de 24 horas.
- Para evitar una reducción en la vida útil de la batería, cárguela al menos una vez al mes cuando la silla de ruedas no esté en uso.



No deje de cargar hasta que se complete el proceso de carga. El uso de la batería que no está completamente cargada acortará la vida útil de la batería.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de encendido se vuelve verde. No deje de cargar antes de que esté completamente cargada. Una vez finalizada la carga, apague la alimentación; de lo contrario, la batería se descargará lentamente. No cargue más de 24 horas. **La sobrecarga es peligrosa.**



Los usuarios deben seguir las siguientes reglas para evitar situaciones peligrosas:

Manténgalo alejado de llamas o fuentes de calor cuando cargue la batería. No use ni se sienta en la silla de ruedas eléctrica mientras se carga.

Utilice cargadores de batería aprobados con voltaje de salida de 24 V, 2A.

Las llamas o el calor intenso pueden provocar un incendio o una explosión de la batería.

Debe estar bien ventilado durante la carga. No exponga la silla de ruedas eléctrica a la luz solar ni a entornos húmedos.

La temperatura ideal del entorno de carga es de 10° a 50°C . Si está fuera del rango de temperatura, la batería no puede funcionar correctamente y puede dañarse fácilmente. Es normal que el ventilador emita un sonido durante la carga. es para enfriar el cargador.

Evite que entre líquido en el cargador durante la carga. No coloque el cargador sobre objetos inflamables: contenedores de combustible, reposapiés o cojines de asientos.

Uso y mantenimiento de la batería

La sustitución incorrecta de la batería puede provocar peligro de explosión. Utilice únicamente baterías del mismo tipo para el reemplazo. Asegúrese de que los polos de la batería sean correctos. Puntos clave para prolongar la vida útil de la batería:

Cargue con frecuencia para mantener la carga de la batería llena. Lo mejor es cargar completamente la batería si la silla de ruedas no está en uso. Si no lo usa durante mucho tiempo, es mejor cargarlo dos veces al mes.



Manténgalo alejado de llamas o fuentes de calor cuando cargue la batería. Él las llamas o el calor intenso pueden provocar un incendio o una explosión de la batería. Durante la recarga, está prohibido fumar. No desconecte la fuente de alimentación cuando el enchufe o sus manos estén mojadas, puede causar una descarga eléctrica. No use ni se siente en la silla de ruedas eléctrica mientras se carga.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA (FALLOS):

Cuando las luces indicadoras LED parpadean, significa que la silla de ruedas tiene alguna anomalía.

Pueden ocurrir en las siguientes partes: motores, frenos, batería, conexiones de cables, etc.

2 tonos de advertencia + 1 tono de error	La conexión no es buena . Por favor revise el joystick y el controlador.
2 tonos de advertencia + 2 tonos de error	El fallo del motor correcto o enchufe mala conexión
2 tonos de advertencia + 3	falla del freno derecho o enchufar pobre conexión
2 tonos de advertencia + 4 tonos de error	La falla del motor izquierdo. o enchufe mala conexión
2 tonos de advertencia + 5 tonos de error	La falla del freno izquierdo o enchufe mala conexión
2 tonos de advertencia + 6 tonos de error	El controlador en corriente sobrecargada o el motor en cortocircuito y sobrecargado.
2 tonos de advertencia + 7 tonos de error	La falla del joystick hall o el balancín no se reinicia/ mala conexión
2 tonos de advertencia + 8	Fallo automático del controlador
2 tonos de advertencia + 9	Fallo del controlador o de la batería

JOYSTICK (CONTROLADOR)

Panel del


Joystick (controlador)



Interruptor de encendido/apagado

Para poner en marcha la silla, presione este botón, las luces del indicador de energía de la batería se encenderán de izquierda a derecha. Pulse de nuevo para apagarla, todas las luces LED se apagarán.

En caso de emergencia puede apagar directamente la alimentación presionando el botón de encendido.

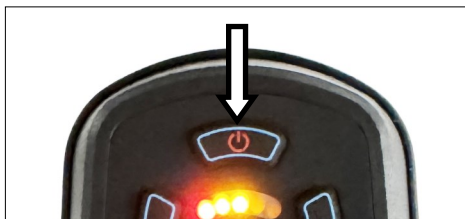


Modo reposo Si el joystick no funciona durante más de 20 minutos, la alimentación se apaga automáticamente y el sistema queda en el modo de suspensión. El sistema volverá a encenderse, del modo de suspensión, presionando el botón de encendido.

Ajuste de velocidad

La velocidad de la silla se puede ajustar según los hábitos del usuario y las circunstancias. También de la destreza que tenga el usuario.

Para regular la velocidad simplemente presione el botón (+) para aumentar la velocidad o el (-) para reducirla.

La velocidad se regula con un rango del 20% (siendo el mínimo) al 100% de la velocidad máxima.

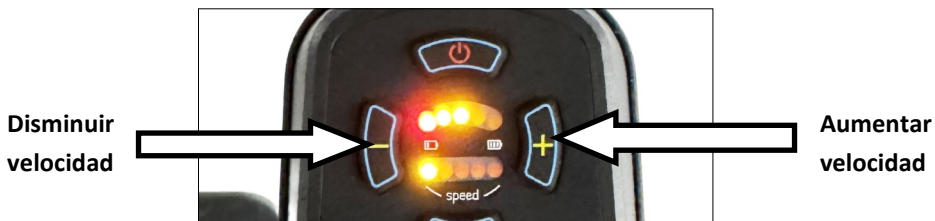

Botón de la bocina

Presione el botón de la bocina.

La bocina sonará hasta que suelte el botón.



Indicador de batería

Después de poner en marcha la silla, el indicador de batería se encenderá indicando el estado de la carga de la batería.



Dispone de 5 luces led para indicar su estado. Cuando está completamente cargada se encenderán todos los leds. A medida que vaya usando la silla se irán apagando los leds. Cuando solo queden 2 leds encendidos, esto nos indicará que debemos poner en carga nuestra silla.

Nota: Si solo se enciende la luz LED roja, la energía de la batería está extremadamente baja, los usuarios necesitan cargar la batería lo antes posible.

Uso de joystick

La dirección de movimiento de la silla de ruedas está controlada por un joystick. El recorrido que dispone el Joystick (del punto neutro hacia el exterior) también controla la velocidad de movimiento.



Encienda o apague la silla cuando el joystick esté en la posición neutra. De lo contrario, el controlador emitirá una señal de operación incorrecta. Suelte el joystick al medio, este error se detendrá. Si el error aún continúa, tal vez esta parte no funcione correctamente, no la use y póngase en contacto con su distribuidor.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la silla de ruedas eléctrica incluye la limpieza, el control de las ruedas, la batería y su carga. Para más mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor. Le recomendamos que haga revisar su silla de ruedas al menos una vez al año.

Limpieza de la silla de ruedas Limpie la silla de ruedas regularmente. Limpie las piezas (como el cojín, el reposabrazos, el controlador) con un paño limpio y ligeramente húmedo. No utilice disolventes orgánicos para la limpieza.

Ruedas

Controlar periódicamente el estado de los neumáticos y su estado de desgaste. Cuando la profundidad de la banda de rodadura del neumático disminuya a 1 mm, sustitúyalo por un neumático nuevo.

Batería

Asegúrese de que la batería se recargue regularmente. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda a los usuarios que no dejen que se agote por completo.

Averías y comprobaciones

Cuando haya una avería al utilizar la silla de ruedas, desconecte la alimentación antes de realizar la comprobación.

Avería: pérdida total de energía, todos los indicadores LED del panel de control están apagados.

Pasos de verificación: Paso 1: Verifique si el enchufe del controlador está flojo. Paso 2: compruebe si la conexión del enchufe del controlador y la caja de la batería está suelta.

Vuelva a insertar el conector (cuando extraiga el enchufe, no tire del cable para evitar daños innecesarios a la línea de alambre). Después de la verificación anterior, si la silla de ruedas aún no puede restaurar la energía, o si los usuarios tienen alguna pregunta sobre la verificación anterior, comuníquese con su distribuidor.



El controlador tiene un sistema de diagnóstico para monitorear tanto el controlador como el motor. Cualquier mal funcionamiento de estas partes es indicado por el controlador. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre indicación de señal de audio.

Comprobaciones de mantenimiento

La siguiente es una lista de verificación. La silla de ruedas eléctrica debe revisarse regularmente. Recomendamos realizar algunas comprobaciones periódicamente antes de utilizar la silla de ruedas.

Antes de usar, verifique si las siguientes partes si están correctas:

Respaldo, reposabrazos, posición del controlador, reposapiés, carga de la batería, palanca de embrague / ajuste para la conversión entre modo manual y modo eléctrico.

Verifique las siguientes partes mensualmente:

Tornillos, frenos, palanca de embrague / ajuste para la conversión entre modo manual y modo eléctrico. Las ruedas delanteras y traseras y la profundidad del dibujo de la banda de rodadura. Conectores del controlador y del el cargador.

Otras condiciones de transporte y almacenamiento Durante el transporte y almacenamiento, la silla de ruedas eléctrica debe colocarse correctamente como se indica en la etiqueta.

Temperatura ambiente $-40^{\circ} \sim + 55^{\circ}$; Humedad relativa 80%; Presión de aire 86kPa \sim 106kPa.

Mantener alejado de la humedad, la luz solar y fuentes de calor. En caso de que las partes eléctricas se dañen debido a la humedad, no guarde la silla de ruedas antes de secarla.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

GARANTÍA

La garantía se extiende, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

